


Innowacyjny system bezdotykowych ostrzy chirurgicznych BMS KLEEN to jeden z elementów oferty produktów bezpiecznych Swann–Morton, które spełniają wszystkie najnowsze normy dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami medycznymi.

System BMS opiera się na standardowych ostrzach chirurgicznych, kompatybilnych z popularnymi rękojeściami o mocowaniach nr 3 i 4. Dzięki temu, koszty i trudności związane z jego wdrożeniem zostały ograniczone do minimum.

Ostrza BMS zamknięte są w specjalnej osłonie, którą w łatwy i prosty sposób otwiera się przed rozpoczęciem zabiegu. Po zakończeniu procedury, osłonę zamyka się ponownie, tym samym umożliwiając bezpieczne przekazanie lub utylizację ostrza.

Mocowanie


1. Ostrza BMS mocuje się do rękojeści B poprzez jej włożenie w tylną część osłony A. Ostrze C zostaje wówczas automatycznie zamocowane na rękojeści. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych skalpeli, mocowanie wymaga użycia odpowiedniej siły. Jednakże, osłonięta krawędź ostrza BMS całkowicie chroni użytkownika przed przypadkowym skaleczeniem.

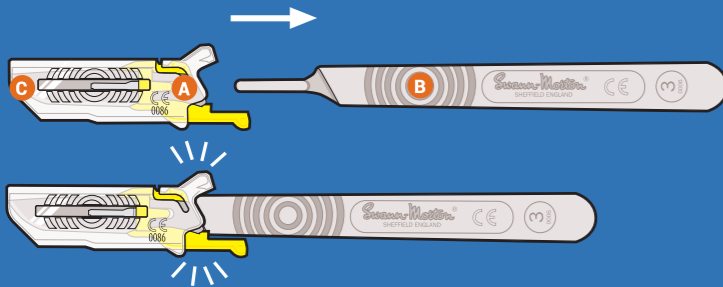

2. Charakterystyczny dźwięk „klik” potwierdza, że ostrze zostało prawidłowo zamocowane. Można to również sprawdzić wzrokowo.


Wysuwanie ostrza

3. Aby odsłonić ostrze C, należy przesunąć osłonę A poprzez naciśnięcie przycisku D i jednocześnie przesunięcie osłony „do siebie”.

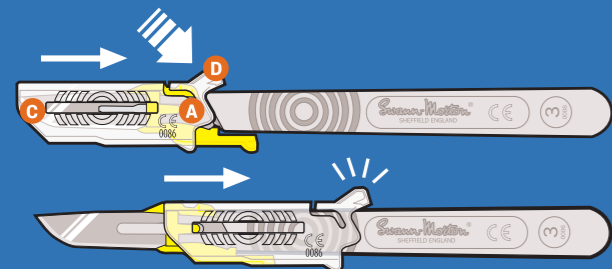


4. Charakterystyczny dźwięk „klik” ponownie potwierdzi, że osłona A została całkowicie odsłonięta.

5. W obecnej, odsłoniętej pozycji, można przystąpić do wykonywania zabiegu w identyczny sposób jak przy użyciu konwencjonalnego skalpela. W sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie większego nacisku (np. przy nakłuciach), możliwe jest zablokowanie osłony ostrza w pozycji otwartej poprzez przyciśnięcie jej dolnej części F.

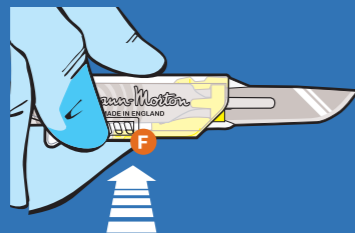

Zamknięcie osłony i zabezpieczenie ostrza


6. W celu zabezpieczenia ostrza, należy przesunąć osłonę A do pozycji zamkniętej poprzez naciśnięcie przycisku D i przesunięcie osłony „od siebie”.

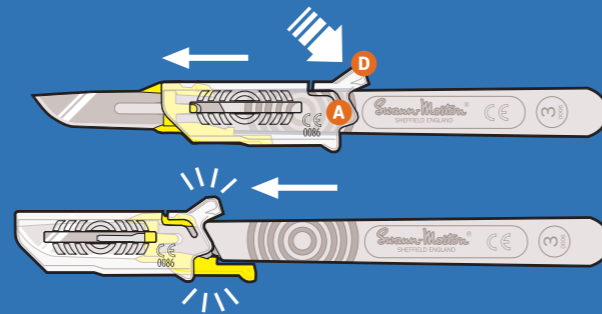

7. Charakterystyczny dźwięk „klik” potwierdzi, że osłona została zablokowana w pozycji zamkniętej. Osłonę ostrza można otwierać i zamykać wielokrotnie w celu bezpiecznego przekazywania narzędzia w trakcie zabiegu.

Usuwanie

8. Po zamknięciu osłony i zakończeniu zabiegu, ostrze BMS można łatwo i bezpiecznie usunąć z rękojeści. W tym celu, przytrzymaj rękojeść w prawej ręce, kierując krawędź ostrza w dół i „od siebie”. Naciśnij równocześnie na przycisk D oraz blokadę E i zsuń osłonę z rękojeści używając odpowiedniego nacisku.

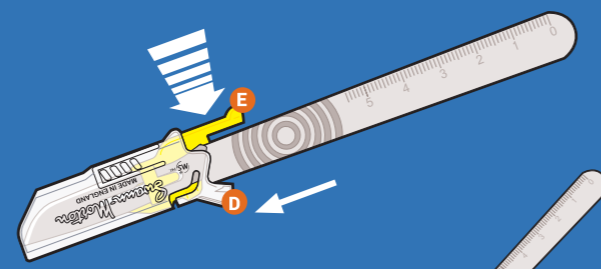

Utylizacja

9. Ostrze BMS zamknięte w osłonie można usunąć z rękojeści bezpośrednio do odpowiedniego pojemnika utylizacyjnego.



Innowacja w dziedzinie bezpieczeństwa użytkownika skalpeli

- System BMS umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie tradycyjnych ostrzy chirurgicznych.
- Osłona ostrza całkowicie zabezpiecza użytkowników przed skaleczeniami w trakcie przekazywania skalpela.
- Mechanizm blokujący osłonę zapewnia pełne odsłonięcie ostrza w czasie trwania całego zabiegu.
- Usuwanie i utylizacja ostrzy BMS odbywają się szybko i bezpiecznie.

Ostrza bezpieczne BMS KLEEN – sterylne




Pakowane pojedynczo, sterylnie, w zbiorczych opakowaniach po 50 szt.

Rozmiar ostrza	Kod produktu	J.m.	Rozmiar ostrza	Kod produktu	J.m.
Mocowanie nr 3			Mocowanie nr 4		
10	5701	opakowanie 50 szt.	20	5706	opakowanie 50 szt.
11	5703		21	5707	
15	5705		22	5708	
11P	5791		23	5710	
15T	5792		24	5711	

Ostrza bezpieczne BMS KLEEN – niesterylne

Pakowane po 50 szt., w zbiorczych opakowaniach po 500 szt.

Rozmiar ostrza	Kod produktu	J.m.	Rozmiar ostrza	Kod produktu	J.m.
Mocowanie nr 3			Mocowanie nr 4		
10	5601	opakowanie 500 szt.	20	5606	opakowanie 500 szt.
11	5603		21	5607	
15	5605		22	5608	
11P	5691		23	5610	
15T	5692		24	5611	

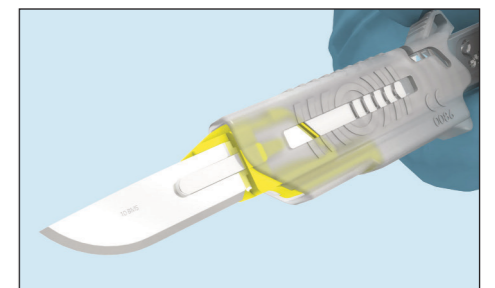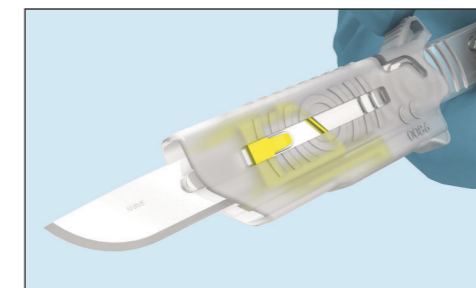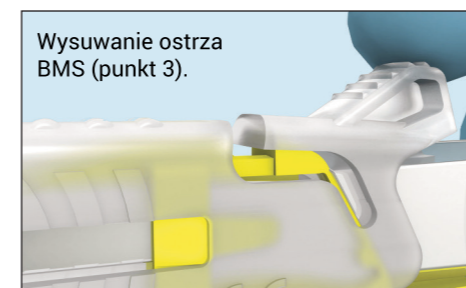

SAFE


Osłona ostrza całkowicie zabezpiecza użytkowników przed skaleczeniami w trakcie przekazywania skalpela.

KLEEN


Mechanizm blokujący osłonę zapewnia pełne odsłonięcie ostrza w czasie trwania całego zabiegu.

EASY

Usuwanie i utylizacja ostrzy BMS odbywają się szybko i bezpiecznie.

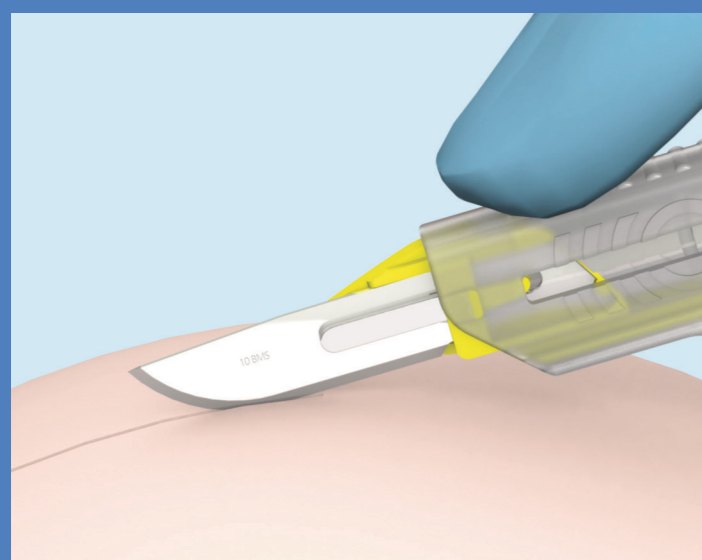

Ostrzy BMS używa się tak samo jak standardowych skalpeli

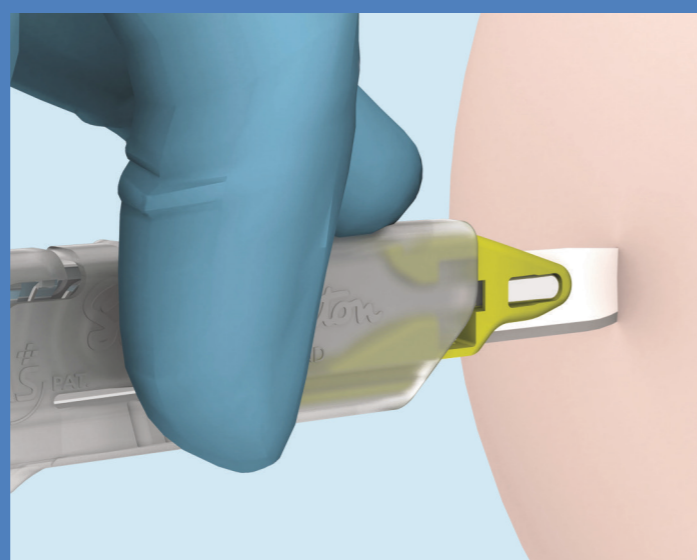

Zablokowana osłona ostrza umożliwi wykonywanie nakłuć



Wyroby medyczne oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG



EMS 633531



ENMS 633525



FM 73368




Zeskanuj kod, by uzyskać więcej informacji

Logo Swann–Morton jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do grupy Swann–Morton Limited. Przedstawione produkty powinny być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, a ich niewłaściwe wykorzystanie może spowodować urazy lub zranienia. Dane i opisy zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przedstawionych produktów przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące do korzystania z nich. Swann–Morton Limited oraz JK Surgical Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

JK SURGICAL
PRZEDSTAWICIEL FIRMY Swann-Morton

JK Surgical Sp. z o.o. — wyłączny przedstawiciel Swann–Morton w Polsce
ul. Żłebowa 8, 60–115 Poznań, NIP PL7790045100, REGON 630178983
tel./fax: +48 61 867 97 81, biuro@jksurgical.pl, www.jksurgical.pl

System ostrzy bezpiecznych BMS KLEEN

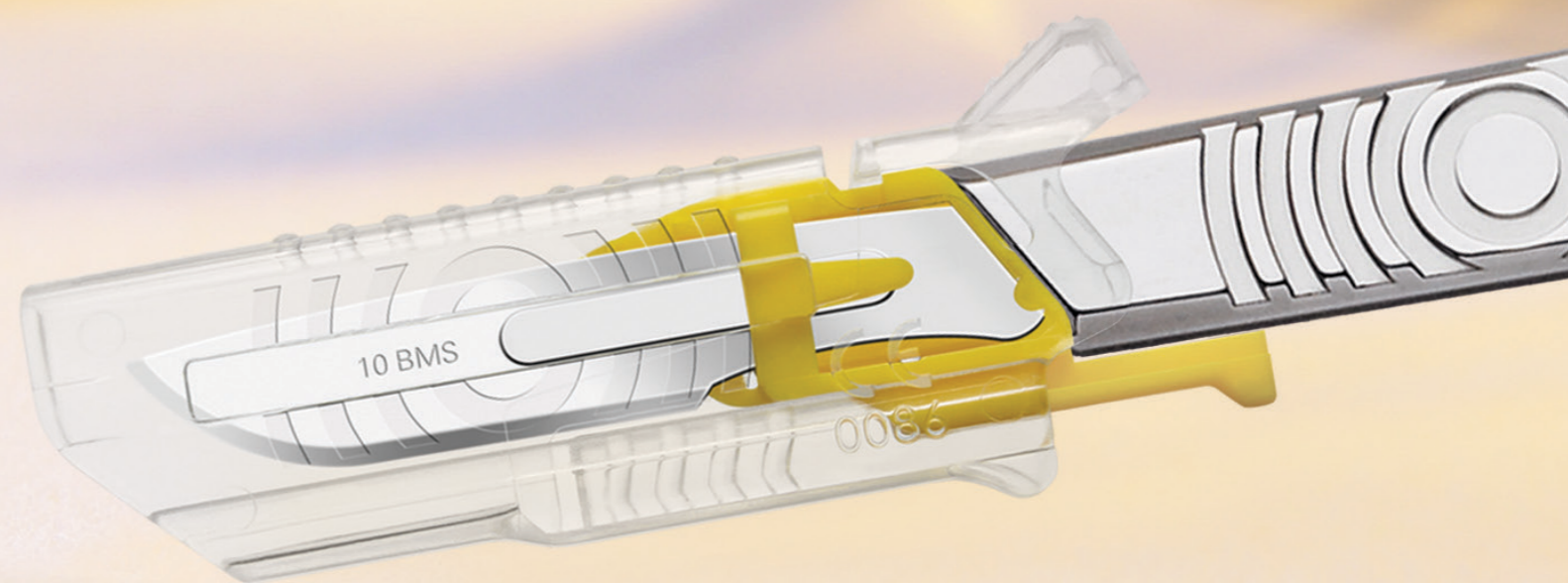

Innowacyjna oferta produktów bezpiecznych

Swann-Morton®