


## Pozycje osłony



Zasunięta

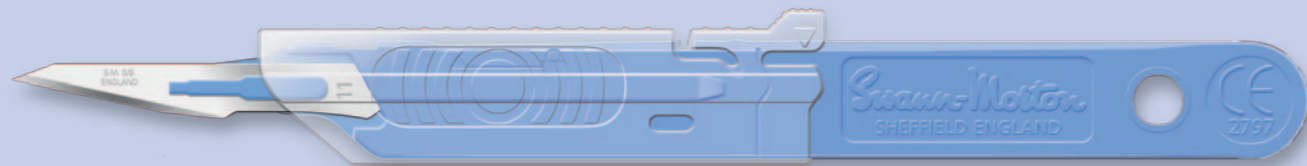

Odsunięta



Zablokowana

# Chroni Zapobiega Zabezpiecza

### Sterylny skalpel bezpieczny z przesuwaną osłoną

Ostrze ze stali nierdzewnej umieszczone na rękojści, indywidualnie pakowane

Rozmiar	Ilość w op.	Kod produktu
10	10 szt.	3601
11	10 szt.	3603
11P	10 szt.	3691
12	10 szt.	3604
15	10 szt.	3605
Stitch Cutter	10 szt.	3626


Rozmiar	Ilość w op.	Kod produktu
20	10 szt.	3606
21	10 szt.	3607
22	10 szt.	3608
23	10 szt.	3610
24	10 szt.	3611

### Niesterylny skalpel bezpieczny z przesuwaną osłoną

Ostrze ze stali nierdzewnej umieszczone na rękojści, opakowanie zbiorcze



Rozmiar	Ilość w op.	Kod produktu
10	500 szt.	3501
11	500 szt.	3503
11P	500 szt.	3591
12	500 szt.	3504
15	500 szt.	3505
Stitch Cutter	500 szt.	3526

Rozmiar	Ilość w op.	Kod produktu
20	500 szt.	3506
21	500 szt.	3507
22	500 szt.	3508
23	500 szt.	3510
24	500 szt.	3511

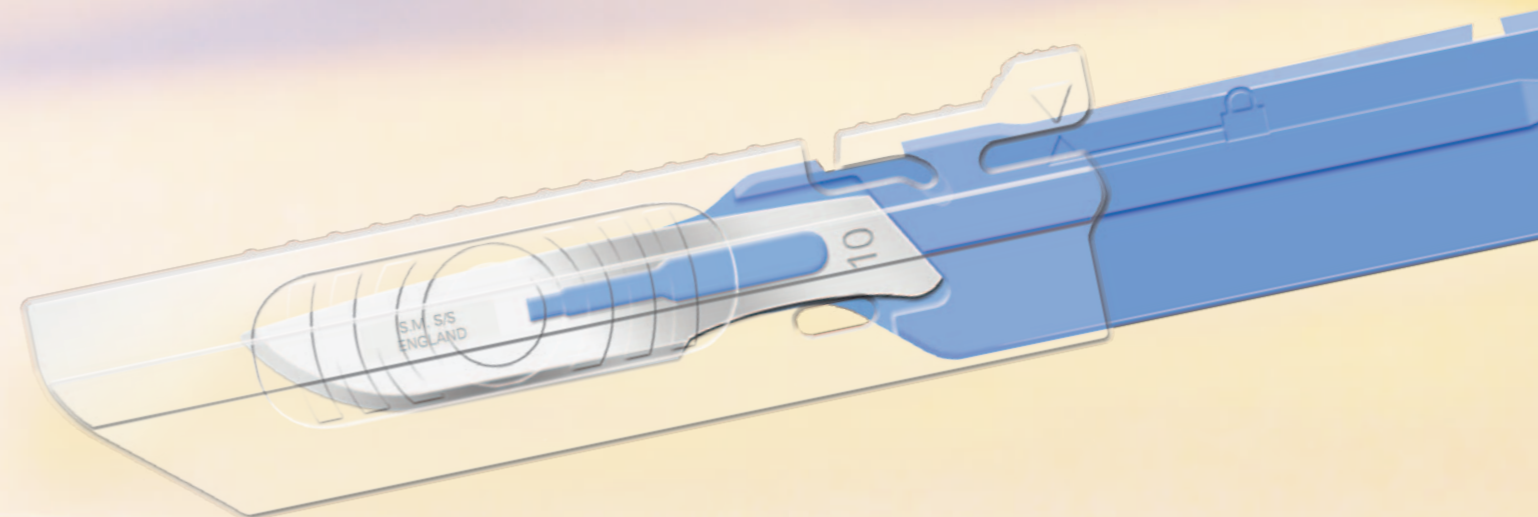


Bezpieczny skalpel z przesuwaną osłoną od

Swann-Morton®

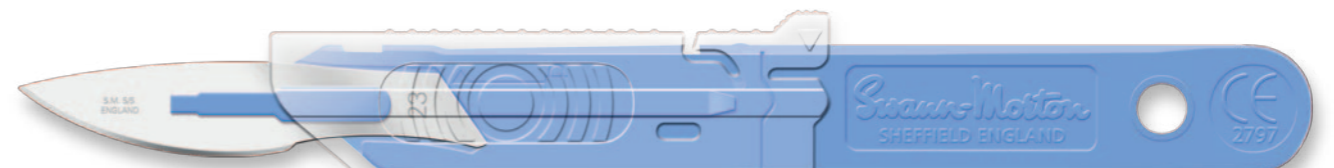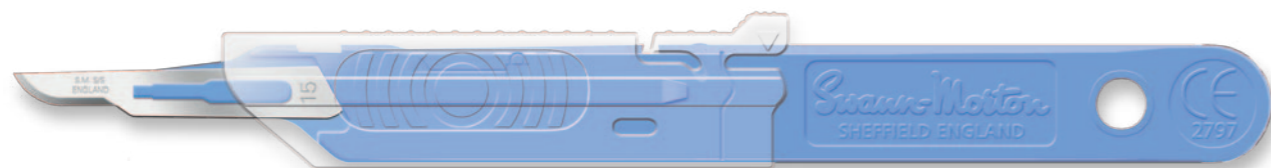


**CHRONI** przed zakażeniami, **ZAPOBIEGA** przypadkowym skaleczeniom i **ZABEZPIECZA** użytkowników.


Celem Dyrektywy Rady 2010/32/UE jest zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla pracowników służby ochrony zdrowia poprzez zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami. Oprócz szkoleń i edukacji w zakresie poprawnego użytkowania ostrych narzędzi, przepisy nakazują uwzględnianie wyrobów medycznych wyposażonych w mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo w ramach procesów oceny ryzyka. Jednorazowy, bezpieczny skalpel Swann-Morton z przesuwaną osłoną zabezpieczającą jest dostępny z jedenastoma różnymi rozmiarami ostrzy, w tym również z ostrzem do usuwania szwów.

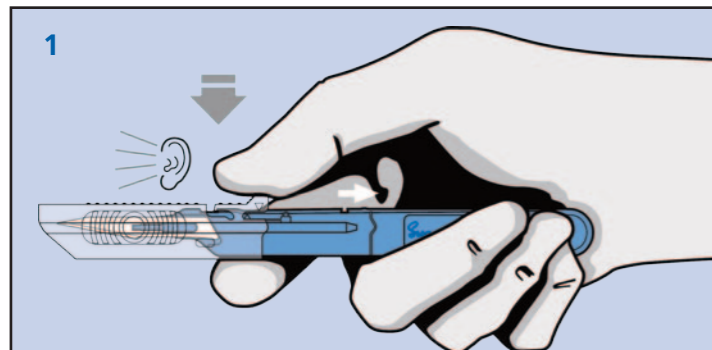

**1** Trzymaj skalpel w pozycji, w której osłona zabezpieczająca znajduje się z dala od użytkownika. Umieść kciuk na górnej części osłony, a palec wskazujący pod spodem. Ostrożnie naciśnij spust znajdujący się na końcu osłony. Płynnie przesunij kciukiem osłonę do siebie (w dół rękojści), aż osiągniesz pozycję końcową, co zostanie potwierdzone słyszalnym kliknięciem. Osłona jest teraz całkowicie schowana, ostrze jest odsłonięte i skalpel jest gotowy do użycia.

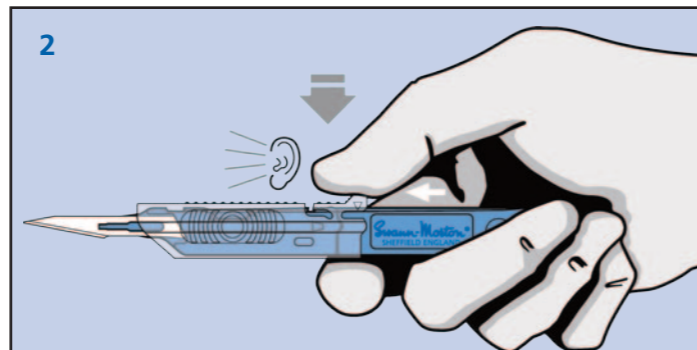

**2** Osłonę zabezpieczającą można w dowolnym momencie ponownie wysunąć, zapewniając ochronę przed zanieczyszczonym ostrzem i przypadkowym zranieniem. Aby ponownie wysunąć osłonę należy nacisnąć spust kciukiem i przesunąć osłonę do przodu, aż do zatrzymania, co zostanie potwierdzone słyszalnym kliknięciem. Ostrze jest teraz zabezpieczone i znajduje się w pozycji umożliwiającej bezpieczne podanie skalpela. Jeśli wymagane jest kolejne użycie ostrza, osłona może zostać ponownie odsunięta.

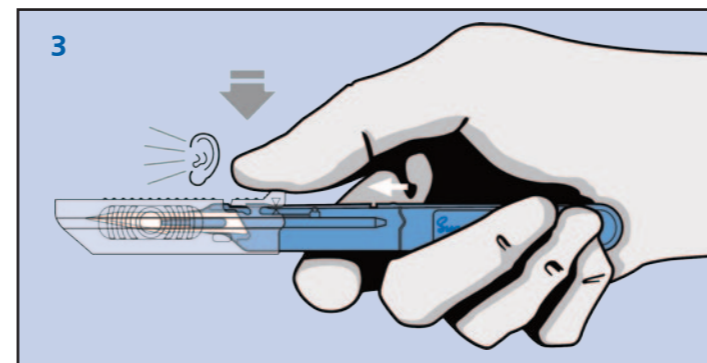

**3** Po zakończeniu zabiegu przesunij osłonę do przodu, do końcowej, zablokowanej pozycji. Aby zabezpieczyć ostrze przed utylizacją, umieść kciuk za spustem i popchnij osłonę zdecydowanym ruchem dalej do przodu, aż usłyszysz kliknięcie – w ten sposób osłona zostanie zablokowana w pozycji zabezpieczającej.



**4** Aby potwierdzić, że osłona jest zablokowana w pozycji zabezpieczającej, upewnij się, że strzałki na rękojści i na osłonie ustawione są w jednej linii. Po zablokowaniu osłony, niemożliwe jest jej ponowne schowanie. Skalpel jest gotowy do utylizacji w odpowiednim pojemniku na ostre narzędzia.



2797



All medical devices comply with the Medical Device Directive, 93/42/EEC as referred by Part 2 of The Medical Devices Regulations 2002, Annex 2, excluding section 4 (as modified by Part 2 of Schedule 2A to the Medical Devices Regulations 2002)



EMS 633531



ENMS 633525



FM 73368

