

BladeFLASK

100 | System Bezpiecznego Usuwania Ostrzy

Pierwszy na
świecie usuwacz
ostrzy używany
wyłącznie jedną
ręką



www.qlicksmart.com

 **QLICKSMART®**
... and be safe

Niedoszacowane zranienia ostrymi narzędziami

Zranienia skalpelem są 6-krotnie bardziej prawdopodobne niż skaleczenia igłą i zdarzają się najczęściej na salach operacyjnych. Niestety, placówki medyczne i pracownicy służby ochrony zdrowia nie zawsze są w pełni świadomi ryzyk związanych ze skaleczeniami ostrymi narzędziami.

Zranienia skalpelami mogą powodować m.in. infekcje wywołane chorobami przenoszonymi we krwi oraz stres psychiczny. Poważniejsze urazy mogą również wymagać skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w celu naprawy uszkodzonej tętnicy dłoniowej, nerwu czy ścięgna.

Wielu zranieniom można z łatwością zapobiec używając BladeFLASK od Qliksmart - jedyne na świecie usuwacza ostrzy używanego wyłącznie jedną ręką.



BladeFLASK pozwala użytkownikom na korzystanie z preferowanych, standardowych rękojeści metalowych.



Dzięki metodzie "wsuń - kliknij - wysuń", BladeFLASK jest prosty w użyciu i pozwala na bezpieczne usuwanie oraz przechowywanie zużytych ostrzy.



Łatwe w użytkowaniu rozwiązanie, stanowiące tańszą alternatywę dla wysuwanych skalpeli bezpiecznych.



W połączeniu z bezkontaktowym sposobem przekazywania narzędzi medycznych, BladeFLASK pozwala zapobiec nawet 5-krotnie większej liczbie skaleczeń niż skalpele bezpieczne.



Wielokrotnie nagradzany na całym świecie, BladeFLASK stanowi praktyczną i efektywną metodę zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami medycznymi.



Przyrządy BladeFLASK bezpiecznie usunęły już ponad 70 milionów zużytych ostrzy i zapobiegły nawet 150 000 zranieniom na całym świecie.



Specyfikacja

Wersje kolorystyczne	Czerwony – Stany Zjednoczone Żółty - międzynarodowy
Kod produktu	QFRGEN - czerwona wersja QFYGEN - żółta wersja
Kod GMDN	46235
Pojemność	100 sztuk ostrzy – BladeFLASK automatycznie blokuje się po całkowitym zapelnieniu
Kompatybilne ostrza i rękojeści	Rękojeści: 3, 3L, 4, 4L, 7, 9, Lawton Long. Ostrza: 10, 10a, 11, 12, 13, itd. aż do i włącznie z nr: 25a, 27 i 36
Niekompatybilne ostrza i rękojeści*	Rękojeści Barron i Beaver, skalpele jednorazowe, okrągłe i szerokie rękojeści, rękojeści typu Ergonomic
Wymiary (sztuka)	Długość 11 cm, szerokość 9 cm, wysokość 14 cm
Waga (sztuka)	Okolo 250g
Akcesoria	Uchwyt mocujący - pozwala na bezpieczny montaż i umożliwia korzystanie z BladeFLASK jedną ręką
Wykonanie	Obudowa: terpolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy (ABS) Mechanizm wewn.: Poliacetal (POM)

* Nowa wersja usuwacza BladeFLASK EVO jest kompatybilna z rękojeściami typu Barron, okrągłymi i szerokimi rękojeściami oraz rękojeściami typu Ergonomic.

Lateks	Nie
DEHP	Nie
Sterylny	Nie
Wielokrotnego użytku	Usuwa do 100 ostrzy przed użyciem. Nie należy próbować samodzielnego opróżniania
Metoda utylizacji	Zgodnie ze Standardem AS 3825:2020 (Procedury i urządzenia do usuwania, przechowywania i utylizacji ostrzy chirurgicznych). Certyfikowany do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z ONZ. Możliwość utylizacji jako odpad medyczny dzięki oznaczeniom materiałów zakaźnych oraz odpowiedniej kolorystyce. Należy przestrzegać obowiązujących procedur dotyczących utylizacji odpadów medycznych. Do utylizacji jako pojemnik na ostre narzędzia medyczne jednorazowego użytku.
Zgodność	Australia - TGA ARTG NO: 146821. USA - zatwierdzenie przedsprzedażowe FDA 510(K) nr K983367, jako pojemnik na ostre odpady UE - wyrób medyczny Klasy I zgodnie z MDR 2017/745, oznaczony znakiem CE Zgodny z ISO 23907-1:2019 (Zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami - wymagania i metody badawcze - Cz. I - pojemniki na ostre odpady jednorazowego użytku)

Jak korzystać z BladeFLASK

ELEMENTY TWOJEGO BladeFLASK:

GRAFIKA: POKAZUJE KTÓRĄ STRONĄ NALEŻY WSUNĄĆ OSTRZE.

TA CZĘŚĆ RĘKOJEŚCI TO TRZPIEŃ - MUSI BYĆ SKIEROWANY W GÓRĘ.

LICZNIK

PLATFORMA

UCHWYT MOCUJĄCY

ZAMONTUJ NA ŚCIANIE LUB WÓZKU:

1. Przed pierwszym użyciem przymocuj BladeFLASK za pomocą uchwytu mocującego*

A MONTAŻ JEST MOŻLIWY PRZY POMOCY TAŚMY DWUSTRONNEJ

B LUB WKRĘTÓW.

* Sprawdź wytyczne znajdujące się w instrukcji dołączonej do uchwytu.

2. BladeFLASK może być zamontowany na ścianie, wózku lub stole.

WSUNŃ W UCHWYT MOCUJĄCY

WSUNŃ W UCHWYT MOCUJĄCY

WAŻNE: BladeFLASK musi być zamocowany w uchwycie zawsze podczas użytkowania.

USUŃ OSTRZE JEDNĄ RĘKĄ:

1. Oprzyj ostrze na platformie, ostrą krawędzią w prawą stronę (trziębieniem do góry). Umieść ostrze na platformie z krawędzią tnącą skierowaną w prawo (trziębienie rękojeści do góry)


2. Wsuń rękojeść do środka usuwacza prostym ruchem, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Wsuń rękojeść.


WAŻNE: Po zapelnieniu maks. 100 sztukami ostrzy, BladeFLASK podlega utylizacji jako odpad medyczny.

Pozostałe produkty Qlicksmart

BladeFlask EVO
Usuwać ostrzy

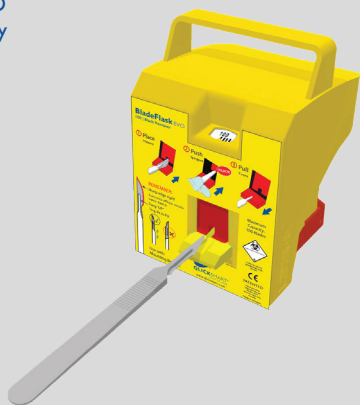

BladeCASSETTE
Sterylny usuwacz ostrzy

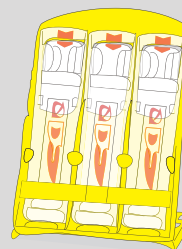

Otwieracze ampułek SnapIT i SnapIT Lite



BladeNeedleSYSTEM 2w1
Sterylny licznik igieł i usuwacz ostrzy



CheckCLIP Identyfikator medyczny



O firmie Qlicksmart

Firma Qlicksmart Pty Ltd została założona w 1999 roku przez dwóch australijskich lekarzy, których główną misją było zwalczanie skaleczeń skalpelami w placówkach opieki medycznej. Obecnie podstawowym celem Qlicksmart jest sprawianie, by środowisko pracy personelu ochrony zdrowia było łatwiejsze i bezpieczniejsze - tak aby mogli oni skupić się wyłącznie na opiece nad pacjentem. Wielokrotnie nagradzane przyrządy bezpieczne firmy Qlicksmart używane są obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie. Qlicksmart współpracuje z innowatorami z sektora opieki zdrowotnej w celu dostarczania rozwiązań ukierunkowanych na często pomijane problemy pielęgniarek, lekarzy i placówek opieki zdrowotnej. Aby dowiedzieć się więcej o przyrządach bezpiecznych Qlicksmart, odwiedź stronę www.qlicksmart.com lub poproś swojego dystrybutora o prezentację.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



Wyszukaj "qlicksmart" i
pozostań w kontakcie



Zeskanuj kod QR,
aby dowiedzieć
się więcej o
BladeFLASK



Dystrybutor: