

BladeSINGLE

Pojedynczy usuwacz ostrzy

**Work Safe
Today,
Play Safe
Tomorrow**



www.qlicksmart.com


 **QLICKSMART**[®]
... and be safe

Niedoszacowane zranienia ostrymi narzędziami

Zranienia skalpelem są 6-krotnie bardziej prawdopodobne niż skaleczenia igłą i zdarzają się najczęściej na salach operacyjnych. Niestety, placówki medyczne i pracownicy służby ochrony zdrowia nie zawsze są w pełni świadomi ryzyk związanych ze skaleczeniami ostrymi narzędziami.

Zranienia skalpelami mogą powodować m.in. infekcje wywołane chorobami przenoszonymi we krwi oraz stres psychiczny. Poważniejsze urazy mogą również wymagać skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w celu naprawy uszkodzonej tętnicy dłoniowej, nerwu czy ścięgna.

Wielu zranieniom można zapobiec używając **BladeSINGLE** od Qlicksmart - jedyne w swoim rodzaju usuwaczowi ostrzy, używanego tylko jedną ręką.

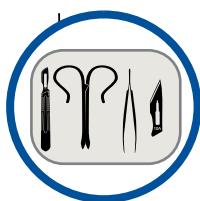

BladeSINGLE jest idealny do mniejszych zabiegów chirurgicznych, usuwa pojedyncze ostrze chirurgiczne w celu dokładnego zliczenia i sprawnej utylizacji.



BladeSINGLE posiada prosty i szybki w użytku mechanizm "wsuń-kliknij-wysuń", służący do ściągania i przechowywania zużytych ostrzy.



Ten łatwy w użyciu usuwacz ostrzy to tańsza alternatywa dla bezpiecznych skalpeli.



Używany razem z techniką podawania bez użycia rąk, BladeSINGLE może zapobiec do 5 razy większej liczbie skaleczeń niż bezpieczny skalpel.



BladeSINGLE pozwala chirurgom zachować swoje preferencje dotyczące standardowych metalowych uchwytów.



BladeSINGLE został pokochany przez pracowników służb medycznych na całym świecie za swoje podwójne zastosowanie, ekonomiczność i łatwość w dołączeniu do customowych pakietów zabiegowych.

Każdy pracownik ochrony zdrowia zasługuje na bezpieczne środowisko pracy.

Bądź bezpieczny dzięki BladeSINGLE od Qlicksmart.



Specyfikacja

Kod produktu	QSBS01	
Kod GMDN	46236	
Pojemność	1 ostrze - usuwacz BladeSINGLE pomieści 1 zużyte ostrze.	
Kompatybilne ostrza i rękojeści*	Rękojeści nr: 3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Baron, Lawton Long, rękojeści cylindryczne Ostrza nr: 10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 5c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15.	
Niekompatybilne ostrza i rękojeści	Rękojeści Beaver, skalpele jednorazowe	
Wymiary (sztuka)	Złożony: Długość 9.3cm Szerokość 2.2cm Grubość 0.9cm	Stojący: Długość 7.3cm Szerokość 2.2cm Wysokość 9.3cm
Waga (sztuka)	< 10g	

Wykonanie	Polipropylen (PP)
Lateks	Nie
DEHP	Nie
Sterylny	Tak
Metoda sterylizacji	Promieniowanie gamma
Wielokrotnego użytku	Nie
Metoda utylizacji	Po zliczeniu ostrzy, BladeSINGLE podlega utylizacji jako odpad medyczny w pojemniku na ostre odpady medyczne.
Zgodność	Australia - TGA ARTG No: 134623 USA - certyfikowany przez FDA UE - wyrób medyczny Klasy I zgodnie z Dyrektywą Rady 9 3/42/EWG, oznaczony znakiem CE


BSBI 1605 10A3Po

* BladeSINGLE jest kompatybilny z większością ostrzy i rękojeści


Jak korzystać z BladeSINGLE

PRZYGOTUJ UŻYWAJĄC OBU RĄK:


1. Odbezpiecz taśmę mocującą.

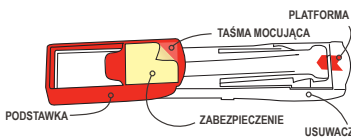

2. Wyjmij usuwacz z podkładki

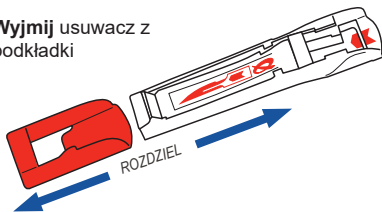

3. Przymocuj podkładkę do płaskiej powierzchni

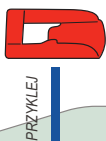


4. Umieść usuwacz na podstawie




USUŃ OSTRZE JEDNĄ RĘKĄ:


5. Używając jednej ręki, wsuń czubek ostrza do usuwacza.

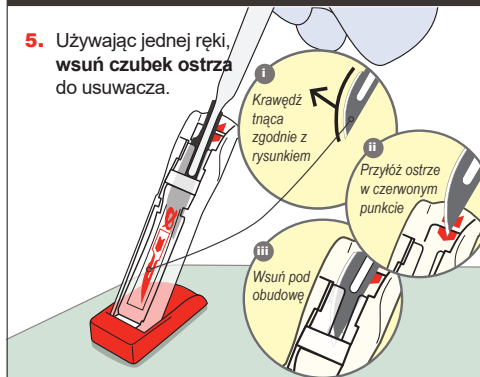

6. Przechyl usuwacz do pozycji pionowej, po czym wsuń ostrze, aż usłyszysz kliknięcie.

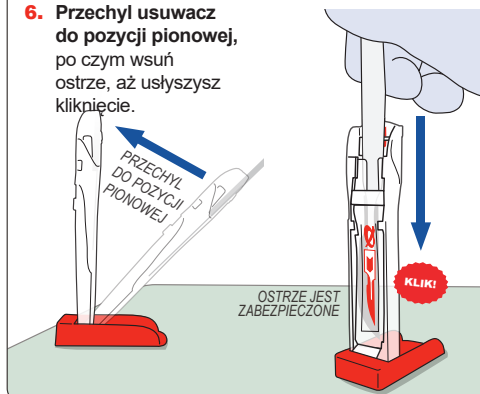


7. Wsuń cały usuwacz z podstawki.

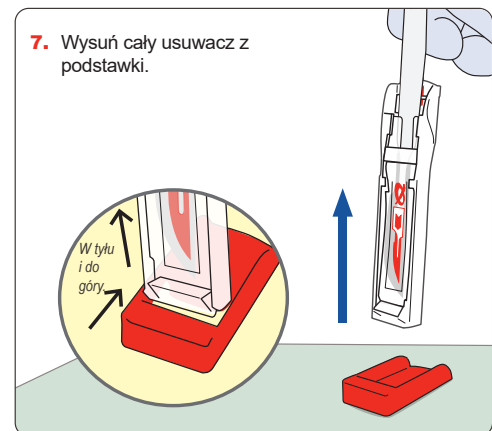


ZABEZPIECZ UŻYWAJĄC OBU RĄK:

8. Wsuń rękojeść z usuwacza.

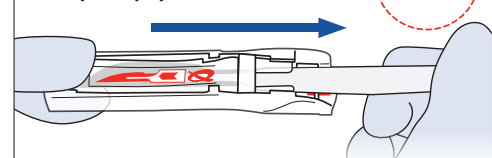

9. Usuwacz jest zabezpieczony w celu zliczenia i utylizacji.

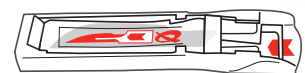

Pozostałe produkty Qlicksmart


BladeFLASK
Usuwać ostrzy




BladeFlask EVO
Usuwać ostrzy



BladeNeedleSYSTEM 2w1
Sterylny licznik igieł i usuwacz ostrzy

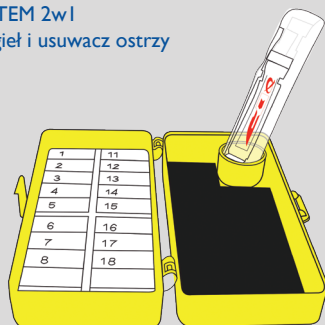

BladeCASSETTE Sterile
Sterylny usuwacz ostrzy

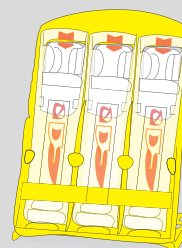

CheckCLIP Identyfikator medyczny



O firmie Qlicksmart

Firma Qlicksmart Pty Ltd została założona w 1999 roku przez dwóch australijskich lekarzy, których główną misją było zwalczanie skażeń skalpelami w placówkach opieki medycznej. Obecnie podstawowym celem Qlicksmart jest sprawianie, by środowisko pracy personelu ochrony zdrowia było łatwiejsze i bezpieczniejsze - tak aby mogli oni skupić się wyłącznie na opiece nad pacjentem. Wielokrotnie nagradzane przyrządy bezpieczne firmy Qlicksmart używane są obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie. Qlicksmart współpracuje z innowatorami z sektora opieki zdrowotnej w celu dostarczania rozwiązań ukierunkowanych na często pomijane problemy pielęgniarek, lekarzy i placówek opieki zdrowotnej. Aby dowiedzieć się więcej o przyrządach bezpiecznych Qlicksmart, odwiedź stronę www.qlicksmart.com lub poproś swojego dystrybutora o prezentację.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



wyszukaj "qlicksmart" i
pozostań w kontakcie



Zeskanuj kod QR,
aby dowiedzieć
się więcej o
BladeSINGLE



Dystrybutor: