



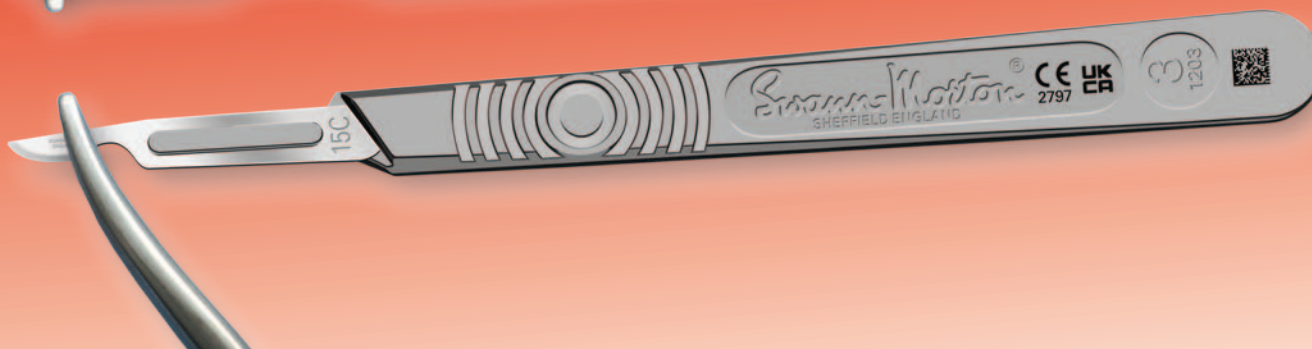

Upewnij się, że poprawnie
mocujesz ostrze na rękojeści...

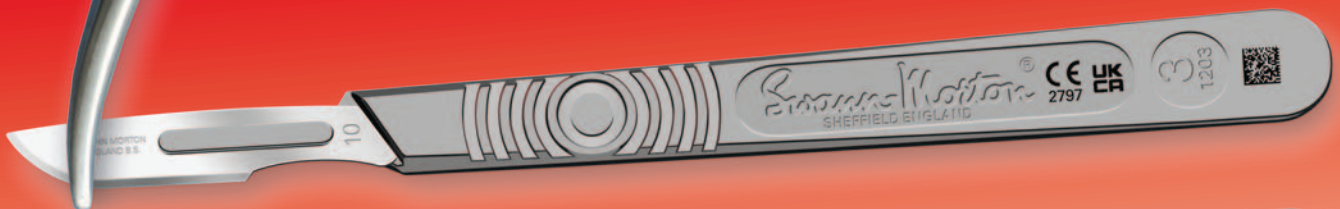

...i unikasz powszechnych
błędów.



**Nie niszczy krawędzi tnącej podczas zakładania ostrza na rękojeść.
Pamiętaj, że ostrza nigdy nie powinny być mocowane na uszkodzonych
rękojeściach.**



PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne postępowanie z ostrzami Swann-Morton

Sposób postępowania z ostrzem chirurgicznym przed jego wykorzystaniem może wpłynąć m.in. na ostrość krawędzi tnącej podczas jej użytkowania.

Jest wiele sposobów, na które krawędź tnąca może ulec zniszczeniu po wyjęciu ostrza z blistra.

Podczas wyjmowania ostrza z blistra uważaj, aby nie upuścić ostrza do metalowej miski medycznej lub innego pojemnika. Przypadkowa styczność ostrza z twardą powierzchnią może wpłynąć negatywnie na ostrość krawędzi tnącej jeszcze zanim ostrze zostanie zamocowane na rękojeści i użyte.

Jeśli używasz igłotrzymacza lub peanu chirurgicznego, upewnij się, że podczas wyciągania ostrza z blistra, chwytasz je od strony tępej, a nie za krawędź tnącą.


Zakładanie ostrza na rękojeść

Postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami w celu zamocowania ostrza na rękojeści.

- 1 Chwyć ostrze za pomocą peanu lub igłotrzymacza, upewniając się, że nie ma styczności z krawędzią tnącą.
- 2 Chwyć rękojeść lewą ręką, w taki sposób, aby mocowanie było skierowane ku ostrzu.



- 3 Umieść ostrze nad mocowaniem rękojeści i wsuń je po prowadnicach znajdujących się na mocowaniu.
- 4 Kliknięcie sygnalizuje poprawne założenie ostrza.

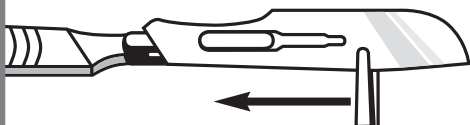


- 5 Aby usprawnić proces zakładania ostrza, podczas wsuwania ostrza na rękojeść, wygnij je lekko w górę.



Ściąganie ostrza z rękojeści

Postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami w celu ściągnięcia ostrza z rękojeści.

- 1 Chwyć krawędź ostrza w punkcie A (rysunek poniżej) za pomocą peanu lub igłotrzymacza, upewniając się, że krawędź tnąca skierowana jest z dala od ręki oraz ciała.
- 2 Upewnij się, że ostrze skierowane jest w dół, ku wózkowi lub pojemnikowi na ostre odpady, a NIE w kierunku innego członka zespołu.
- 3 Trzymając stabilnie rękojeść, podważ tylną krawędź ostrza za pomocą peanu lub igłotrzymacza i zsuń ostrze z rękojeści.

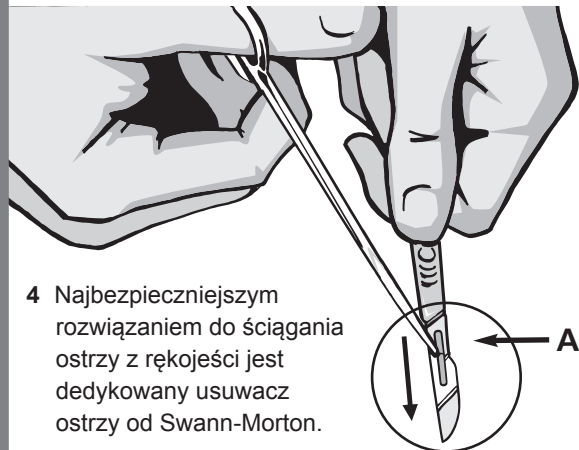

- 4 Najbezpieczniejszym rozwiązaniem do ściągania ostrzy z rękojeści jest dedykowany usuwacz ostrzy od Swann-Morton.

NIE NISZCZ KRAWĘDZI TNĄCEJ PODCZAS ZAKŁADANIA OSTRZA NA RĘKOJEŚĆ!

Pamiętaj, że ostrza nigdy nie powinny być mocowane na uszkodzonych rękojeściach.

Logo Swann-Morton jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do grupy Swann-Morton Limited. Przedstawione produkty powinny być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, a ich niewłaściwe wykorzystanie może spowodować urazy lub zranienia. Dane i opisy zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przedstawionych produktów przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące do korzystania z nich. Swann-Morton Limited oraz JK Surgical Sp. z o. o. (importer wyrobów na terenie Polski) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.